


Hammasproteesin puhdistava poretabletti

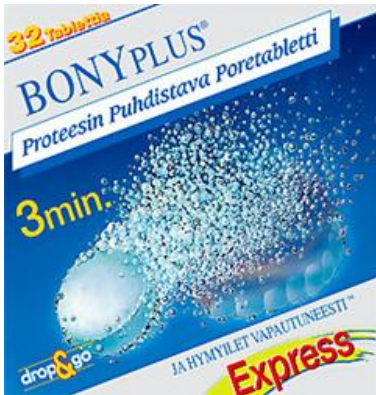

Pakkauksessa 32 tablettia

BONYPLUS® Proteesin puhdistava poretabletti™

Tekee päivittäisen proteesien puhdistamisen helpoksi ja tehokkaaksi. Tabletin koostumus, jossa on aktiivista happea ja peseviä ainesosia poistaa plakin, muita epäpuhtauksia, ruuan murut, nikotiinin, teen, kahvin jne. värjäymät.

BONYPLUS® Proteesin puhdistava poretabletti™ säännöllinen käyttö palauttaa säihkyvyyden proteesiin.

Käyttöohje:

- 1.** Laita lasiin vettä ja yksi Proteesin puhdistava poretabletti.
- 2.** Upota proteesi veteen kokonaan. Anna vaikuttaa 3 minuuttia.
- 3.** Huuhtelee sitten juoksevan veden alla.
- 4.** Heitä liuos pois.

Proteesi on nyt raikas!

Tabletin käyttö ei ajankaan myötä aiheuta proteesissa värimuutoksia.

Tabletin käyttö jättää raikkaan mintun maun ja ehkäisee pahaa hajua. Proteesin metalliset osat eivät vahingoitu eikä metallista liukene mitään veteen. Samalla se tekee varmemman pohjan 12 tunnin kiinnitystahnalle.

Saatavana mm. apteekkeista.
Tamron tilausnumero 1991736