



Innehåller 12 tabletter.

Genombrott inom avtagbara tand apparaters hygien

Bonyf Junior/Senior - desinficerande brustablett

Bonyf desinficerande brustablett helt avlägsnar biofilmen från akryl ytor. Smutsig avtagbar tand apparat eller tandprotes kan förorsaka smärta i mun, brännande känsla i mun, illaluktande andedräkt osv. Munnens inflammation är farlig. Bakterier har fritt tillträde till blodcirkulation. Detta kan vara skuld på många, farliga sjukdomar, t.ex. lunginflammation. Dålig munhygien kan öka risken för hjärt- och hjärnslag.

Desinficeringsprocessen:

- Reducerar avsevärt *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* och *Enterococcus hirae* -bakterierna
- Elimineras *Candida albicans* jästsvamp
- Avlägsnar 99,9% *Herpes Simplex* -viruset

Vi rekommenderar att ni desinficerar putsborsten samtidigt!

Bruksanvisning :

Före NitrAdine® brustablett bruk borsta, rengör och skölj apparat som vanligt Sänk apparat helt i ett glas (ung. 150 ml) med ljumt vatten. Lägg in en tablett. Använd 1 tablett på en övre eller nedre apparat. Se att apparaten är helt i vattnet. I normal bakterieoch jäst inflammation låt verka i lösning 15 minuter. Att försäkra avtagbar tand apparat är fri från alla virus sänk den för 1 timme i lösning. Ta apparat från vatten och skölj väl under rinnande vatten innan den sätts på platsen igen. Om apparat har tillsvidare smak lägg den i ljumt vatten för 10 minuter.

Rekommenderande dosering:

En tablett 2 gånger per vecka. Intensiv behandling: Enligt tandläkarens eller tandhygienistens rekommendation använd i början dagligen för 2 veckors tid. Därefter 2 gånger per vecka inom normal rengöringsrutin.

Varning: Endast för externt bruk. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen. Skölj väl före placering igen i mun. Lagras i torr plats (under 50°C)

Produkten fås bl.a. på apotek.
Tamros nummer 2062180