



## Oikomislaitteet, purentakiskot, hammassuojat



Pakkauksessa 12 tablettia.

### Junior – Oikomislaitteiden ja purentakiskojen desinfiointiin

Tiesitkö, että likaiseen ja desinfiointimattomaan oikomiskojeeseen tai hammassuojaan pesiytyy mikrokasvustoa joka voi aiheuttaa:

- kipuja suun alueella
- suupielen haavaumia
- polttavaa tunnetta suussa
- pahanhajuista hengitystä

Normaali mekaaninen puhdistaminen ei poista biofilmiä, jonka suojassa elää bakteereja. Toisinaan flunssakierrekkin jatkuu vaikka lääkekuurit on syöty! Syy saattaa löytyä likaisesta laitteesta suussa.

### Käyttöohje:

1. Puhdista ensin laite tavalliseen tapaan harjalla ja huuhtele.
2. Desinfiointiva laite upotetaan vesilasiin jossa on haaleaa vettä ja 1 desinfiointitabletti. Varmista, että laite on kokonaan liuoksessa. Annetaan vaikuttaa 15 minuuttia tai kauemmin.
3. Desinfiointin jälkeen laite huuhdellaan juoksevalla vedellä.

**Huom!** Jos laitteessa on metallia: Bonyf:n poretabletit eivät aiheuta korroosiota.

- Poistaa oleellisesti piilevän *Candida Albicans* kasvuston. Tunnetaan nimillä suun hiivasienitulehdus/sammastulehdus/proteesistomatitis.
- Vähentää merkittävästi *Stafylococcus aureuksen*, yhden tunnetuimmista, vaurioituneella limakalvolla, suutulehduksia aiheuttavista bakteereista.
- Vähentää merkittävästi *Pseudomonas aeruginosa* bakteerin esiintymistä, joka saattaa pesiytyä hammasproteesien mikrohuokosiin.
- Hävittää 99,9 % *Herpes Simplex* infektiota aiheuttavan viruksen

### Suosittelava annostus:

Suositteluaan käytettäväksi alussa päivittäin kahden viikon ajan. Sen jälkeen käytä tabletteja ainakin kaksi kertaa viikossa osana proteesin puhdistusrutiinia. Välttämättä ei tarvita sienilääkitystä tulehduksen poistamiseksi suusta.

**ÄLÄ NIELE TAI JUO LIUOSTA, ÄLÄKÄ KURLAA TÄLLÄ TUOTTEELLA!  
PIDÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.** Liuosta ei käytetä uudelleen.

### Muista myös huolehtia hammas-/puhdistusharjasi desinfiointista!

Saatavana esim. apteekkeista.  
Tamron tilausnumero: 2062180