



Pakkauksessa 12 poretablettia.

Senior – desinfiioiva poretabletti hammasproteeseille

Nopea ja tehokas menetelmä irrotettavien hammasproteesien desinfektioon. Sopii myös hammassuojien ja purentakiskojen desinfektioon. *Poistaa täysin biofilmin, jonka suojassa elää antibiooteille resistenttejä bakteereja.* Vastaavaa tuotetta ei ole markkinoilla.

- Poistaa oleellisesti piilevän *Candida Albicans* kasvuston. Tunnetaan nimillä suun hiivasienitulehdus/sammus/proteesistomatitis
- Vähentää merkittävästi *Stafylococcus aureuksen*, yhden tunnetuimmista vaurioituneella limakalvolla suutulehduksia aiheuttavista bakteereista
- Vähentää merkittävästi *Pseudomonas aerugiosa* bakteerin esiintymistä, joka saattaa pesiä hammasproteesien mikrohuokosiin
- Hävittää 99,9 % *Herpes Simplex* infektion aiheuttaman viruksen.

Käyttöohje:

1. Harjaa proteesi hyvin, niin että kaikki ruuantähteet on poistettu. Huuhtelee sen jälkeen lämpimällä vedellä.
2. Laita yksi tabletti lasiin, jossa on lämmintä vettä (noin 150 ml)
3. Upota proteesi veteen. Käytä vain yksi tabletti yhtä ylä- tai alaproteesia kohden!
4. Varmista että proteesi on kokonaan veden peitossa.
5. Jätä se liuokseen vähintään 15 minuutiksi.
6. Ota proteesi lasista ja huuhto hyvin juoksevalla vedellä ennen uudelleen laittamista suuhun. Jos proteesiin jää makua, laita se 15 minuutiksi vesilasiin, jossa on puhdasta vettä.

Suosittelava annostus:

Suositteluaan käytettäväksi alussa päivittäin kahden viikon ajan. Sen jälkeen käytä tabletteja ainakin kaksi kertaa viikossa osana proteesin puhdistusrutiinia. Välttämättä ei tarvita sienilääkitystä tulehduksen poistamiseksi suusta.

ÄLÄ NIELE TAI JUO LIUOSTA, ÄLÄKÄ KURLAA TÄLLÄ TUOTTEELLA! PIDÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA. Liuosta ei käytetä uudelleen.

Huom. Huolehdi myös hammas-/ puhdistusharjasi desinfiointi.

Saatavana esim. apteekkeista.
 Tamron tilausnumero: 2062180